

<PHROZEN HEAT & MIX



Mezcla completa para
impresiones homogéneas



Diferentes modos para
cada necesidad



Resultados impecables y
resistentes a la intemperie



HEAT & MIX

ESTACIÓN DE
MEZCLA DE RESINA.
MANOS LIBRES,
PERO SIEMPRE LISTA

Las resinas dentales pueden ser difíciles de mezclar, lo que suele provocar inconsistencias de color y comprometer la calidad de impresión, y esto va en detrimento de la satisfacción de sus clientes. Con **Heat & Mix**, puede mezclar y precalentar completamente su resina a la temperatura de impresión óptima, garantizando **impresiones suaves y consistentes con resultados impecables** en todo momento.



protechno



Cómo HEAT & MIX soluciona los problemas

Heat & Mix cuenta con tres modos diferentes:



Agitación Rápida (5 Minutos)

¿Necesita una mezcla rápida de último minuto antes de verter? Use la Agitación Rápida para mezclar la resina durante 5 minutos sin calentar.



Calentar y Agitar

¿Imprimir una resina más viscosa? Use Calentar y Agitar para una mezcla óptima con una temperatura máxima de 50 °C.



Agitación Constante (Hasta 6 Horas)

Tenga su resina siempre lista para el siguiente vertido manteniéndola en espera hasta 6 horas con la Agitación Constante.

Adecuado para todo tipo de resinas dentales.

Guía Quirúrgica

Calentar y Agitar — 15-30 min

Restauración con Relleno de Cerámica

Calentar y Agitar — 30-45 min

Férula Oclusal

Calentar y Agitar — 15-30 min

Base de la Prótesis Dental

Calentar y Agitar — 15-30 min

Modelo de Muñón Desmontable

Agitación Rápida — 5 min

Máscara Gingival

Calentar y Agitar — 15 min

Compatible con la mayoría de las resinas dentales.

Compatible con la mayoría de botellas redondas o cuadradas de 500/1000 g con un diámetro máximo de 95 x 225 mm.

Características

Dimensiones	41,6 x 20,0 x 19,2 cm (ancho x profundo x alto)
Botellas admitidas:	Ø 9,5 mm x 22,5 mm
Temperatura máxima:	50 °C
Potencia:	100 w
Control de usuario:	Pantalla táctil de 5"
Alimentación:	24V/5A (CC)
Peso:	4,5 kg.

Distribuido por:



protechno

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain
TEL. (+34) 972 526 169
protechno@protechno.com
www.protechno.com